


Suivez les étapes détaillées de ce guide pour la première prise en main de votre lecteur de glycémie.

IMPORTANT : Veuillez lire le manuel d'utilisation fourni avec le système.

Icônes du lecteur de glycémie

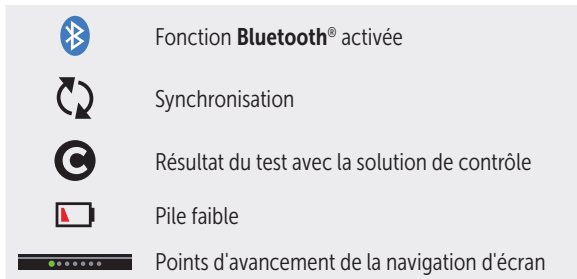

Consultez le manuel d'utilisation pour les symboles et les icônes du lecteur de glycémie et leur signification.

Contactez OneTouch® Services, du lundi au samedi, de 8h à 20h, service et appel gratuits : 0 800 459 459.

Fabricant :
LifeScan Europe GmbH
Gubelstrasse 34
6300 Zug
Switzerland

OneTouch®
AW 07180102C
© 2018-2022 LifeScan
IP Holdings, LLC
Date rév. : 08/2022
Lecteur de glycémie



Consulter les précautions d'emploi

1 Réglage du lecteur de glycémie

Allumer le lecteur

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran Bienvenue apparaisse.

Utilisez les boutons ou pour le réglage des différents paramètres et appuyez sur pour confirmer.

Réglage de la langue

Sélectionnez la langue souhaitée, puis appuyez sur .

Facultatif : Terminez le réglage au moyen de l'application mobile OneTouch Reveal®*.

Sélectionnez **Oui** pour que l'application vous guide dans le réglage.

Téléchargez l'application mobile OneTouch Reveal® avant d'associer votre lecteur de glycémie et votre appareil mobile.




L'application mobile OneTouch Reveal® - interface patient - n'est pas un dispositif médical.



Réglage de l'heure

Appuyez sur le bouton si l'heure est correcte ou modifiez-la au besoin et confirmez.

* Visitez le site www.gammeOneTouch.fr pour plus d'informations sur l'application mobile OneTouch Reveal® et pour découvrir si elle est disponible dans votre pays.

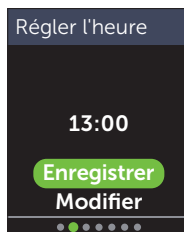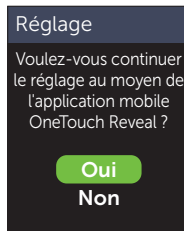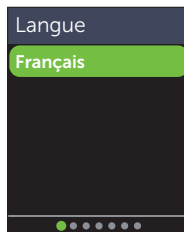

Réglage de la date

Appuyez sur le bouton si la date est correcte ou modifiez-la au besoin et confirmez.

Réglage des seuils d'objectif Avant et Après repas

Appuyez sur le bouton si les seuils pré-réglés de vos objectifs Avant repas et Après repas sont corrects ou modifiez-les au besoin et confirmez.



Réglage du suivi des tests

Appuyez sur le bouton si l'objectif prédéfini est correct ou modifiez-le au besoin et confirmez.

Réglage de l'objectif moyen sur 90 jours

Appuyez sur le bouton si l'objectif moyen sur 90 jours est correct ou modifiez-le au besoin et confirmez.

REMARQUE : Discutez avec votre professionnel de santé des seuils d'objectif, de l'objectif de suivi des tests et de l'objectif moyen sur 90 jours qui sont appropriés pour vous.

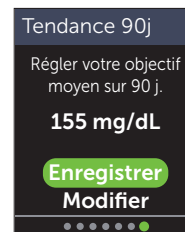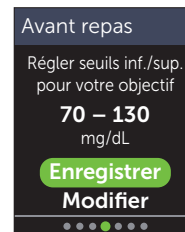

2 Réalisation d'un test


Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon, rincez-les et séchez-les avant de prélever un échantillon. Retirez l'embout du stylo autopiqueur, puis insérez une lancette stérile. Tournez le disque de protection. Remettez l'embout du stylo autopiqueur en place.

Insérez une bandelette réactive (le côté doré et les 2 ergots argentés face à vous) pour mettre le lecteur de glycémie en marche.


Ajustez le réglage de la profondeur du stylo autopiqueur. Armez le stylo autopiqueur et maintenez-le fermement contre le côté de votre doigt. Appuyez sur le bouton déclencheur. Massez doucement votre doigt afin d'obtenir une goutte de sang bien ronde.

Appliquez l'échantillon sanguin sur l'un des deux côtés latéraux de la bandelette réactive.


Une fois que le sillon est rempli, il devient rouge et votre résultat s'affiche après 5 secondes environ.

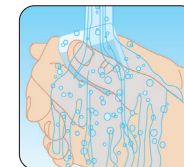


Ergots argentés

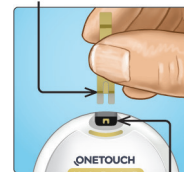

Fente d'insertion de la bandelette réactive

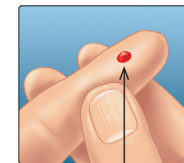

Taille approximative

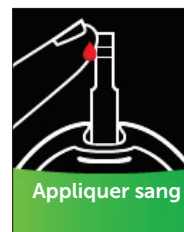


Appliquer sang

3 Lecture du résultat

Indicateur du code couleur ColourSure®

L'indicateur du code couleur ColourSure® vous indique immédiatement si votre résultat est bas (bleu), élevé (rouge) ou dans l'objectif (vert). Il indique également quand votre résultat est dans l'objectif mais se rapproche des seuils Hypo (bas) ou Hyper (élevé) de votre objectif glycémique. Une note de texte ou un emoji pointe sur un segment de la barre de couleur. Il est important de bien paramétrer le dispositif selon les objectifs fixés par le médecin afin de définir l'affichage du code couleur.

Exemples de résultat

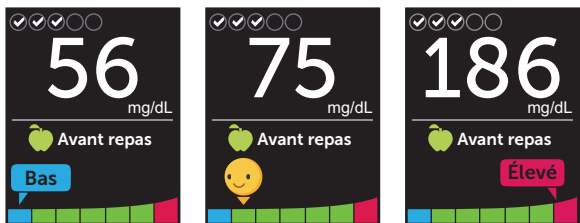

Inférieur à l'objectif

Dans l'objectif, Extrémité inférieure

Supérieur à l'objectif

Informations liées aux repas et autres informations


Une information Avant repas (🍏) est automatiquement appliquée à votre résultat. Vous pouvez remplacer l'information repas par Après repas (🍷) et ajouter une autre information (Info.).



Messages de la fonction Coach de Glycémie (Blood Sugar Mentor™)

La fonction Coach de Glycémie (Blood Sugar Mentor™) fournit des informations sur vos progrès et offre des conseils sur la gestion du diabète, y compris des messages éducatifs et motivationnels basés sur vos résultats glycémiques actuels et précédents, ainsi que d'autres données renseignées.

Exemples de messages de la fonction Coach de Glycémie (Blood Sugar Mentor™)

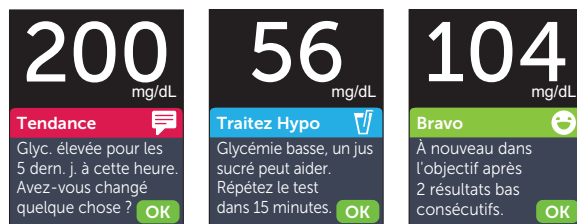

Informations

Conseils

Encouragements

La fonction Coach de Glycémie (Blood Sugar Mentor™) ne se substitue pas aux conseils de votre professionnel de santé. Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin.

Il est important de bien paramétrer le dispositif selon les objectifs fixés par le médecin afin de définir l'affichage du code couleur.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par LifeScan Scotland Ltd. Les autres marques de commerce et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

4 Connexion à un appareil mobile




La technologie Bluetooth® vous permet de transférer instantanément vos résultats sur un appareil mobile sur lequel vous pouvez utiliser l'application mobile OneTouch Reveal® pour visualiser vos résultats sous forme de représentations visuelles ou graphiques, pour configurer un objectif quotidien de nombre de tests, pour consulter les messages de la fonction Coach de Glycémie (Blood Sugar Mentor™) et pour vous aider à identifier des tendances glycémiques.

Dans le menu Réglages, sélectionnez **Bluetooth**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Une ✓ indique si la fonction **Bluetooth**® est actuellement activée ou désactivée.

Appuyez sur le bouton **↑** ou **↓** pour faire passer le statut de **Bluetooth**® à **Activé** et appuyez sur **OK**.

À l'invite de votre appareil mobile, entrez le code PIN affiché.

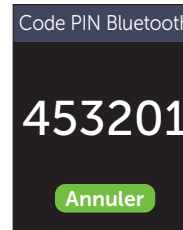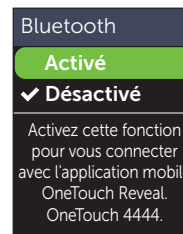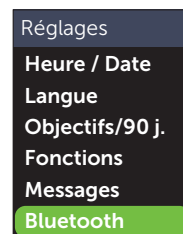

Exemple de code PIN

Enregistrez votre lecteur pour obtenir de l'aide et une assistance : gammeonetouch.fr/bienvenue



ONETOUCH Verio Reflect®

Système d'autosurveillance de la glycémie

Guide de démarrage



AW 07180102C